

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Rens servietter

Comfeel Rens

Comfeel rens servietter anvendes til afrensning af hud, der har været i kontakt med f.eks. urin og tarmindehold. Er også velegnet til at fjerne klæberester.

Dette er et effektivt og skånsomt alternativ til vand og sæbe ved rensning af den sarte hud omkring en stomi / inkontinens.

Anvendelse:

Kom rensmidlet på en blød klud eller et stykke vat og tør forsigtigt huden ren. Lad det tørre, før der påsættes en klæber.

Rensmidlet kan også bruges til at fjerne små mængder klæberester.



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Rens servietter

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360010	4715	Coloplast	Comfeel rens serviet m. alkohol	SERVIET	Pk. á 30 stk.
0360011	4710	Coloplast	Comfeel rens flaske m. alkohol	FLASKE 180 ml	Æske á 6 stk.